

Hur du startar din DALE4100

Uppkoppling

- Montera 3-vägskranen, en vattenfylld spruta samt setet till pumpen och dränageslangen enl figuren.
- Sätt i nätsladden och slå till nät-strömbrytaren.
-P- visas i displayen.

Förberedelse för start

- Öppna mellan DALE4100 och sprutan med 3-vägskranen samt injicera vatten tills -P- skiftar till SEL i displayen.
- Vrid 3-vägskranen så att förbindelsen öppnas mellan DALE4100 och pumpen.
- Låt sprutan sitta monterad på kranen.

Test

- Tryck på INITIATE FLOW för "Steady flow mode".
- Vänta 3 sek.
- Tryck på samma knapp igen för att starta testen.

eller


- Tryck på VOLUME för "Non-steady flow mode".
- Vänta 3 sek och tryck sedan på VOLUME igen.
- Tryck på INITIATE FLOW för att visa flödes hastighet.

eller

- Tryck på PRESSURE för test av ocklusionstryck.

Reset

- RESET måste tryckas efter varje avslutad test.
- Efter RESET måste man injicera lite vatten från sprutan in i DALE4100.

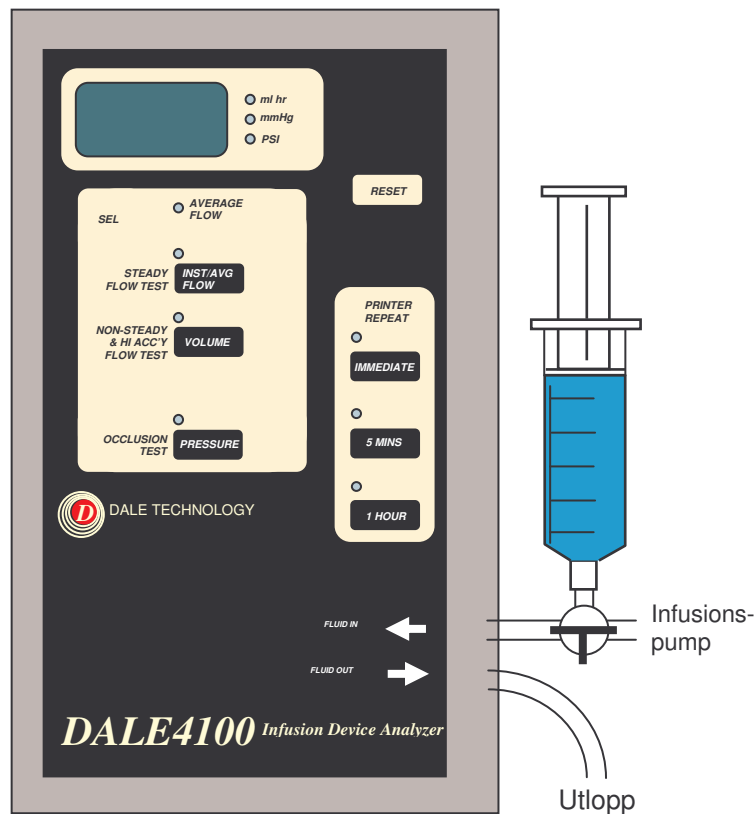

Har du några frågor? Ring Tesika Teknik AB, 046 - 55 080 eller maila till info@tesika.se

2006-12-19

Skriv ut och plasta in !