



Kortformsanvisning **QED-6** Defibrillatorrestare

- Kontrollera att defibrillator- "spadarna" är fria från repor och så att alla kablar är OK.
- Om nätsladd används: Använd jordat uttag!
- Använd ingen kontaktpasta eller liknande vid test på QED-6.
- Håll spadarna hårt mot plattorna på QED-6 för god kontakt.
- Slå på QED-6 defibrillatorrestaren.
- Efter självttest kommer huvudmenyn upp.

Mätning av pulsenergi.

- Välj ENRG (ENERGY) för mätning av pulsenergin.
- Välj mätområde (max 100 J eller max 1000 J).
- Fyra av en puls och displayen visar det uppmätta värdet.

Mätning av synkroniseringstid.

- Välj SYNC för mätning av EKG-synkroniseringen. QED-6 mäter tidsfördröjningen från basen eller toppen av R-taggen på ett EKG som simuleras genom EKG-kontaktarna på testaren (90BPM).
- Välj Base/Peak samt mätområde (100J/1000J).
- Fyra av och avläs resultatet.

2003-07-31

Postadress	Telefon	Telefax	E-post
Tesika Teknik AB Björnstorps by 240 13 GENARP	046-55 080	046-55 082	info@tesika.se
	Hemsida	Postgiro	Org nr
	www.tesika.se	120 94 09-0	556526-9288